

earshower Ohrdusche ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie die earshower Ohrdusche verwenden. Werfen Sie diese Broschüre nicht weg.

- 1. WARUM SOLLTEN SIE IHRE OHREN REINIGEN?**
- 2. WAS IST EINE EARSHOWER OHRDUSCHEN?**
- 3. WIE WIRD DIE EARSHOWER OHRDUSCHEN VERWENDET?**
- 4. KANN DIE EARSHOWER OHRDUSCHEN VON PERSONEN MIT HÖRGERÄT VERWENDET WERDEN?**
- 5. GIBT ES RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DER EARSHOWER OHRDUSCHEN?**
- 6. WARUM IST DIE EARSHOWER OHRDUSCHEN SO SICHER ZU VERWENDEN?**
- 7. WARUM WIRD VON DER NUTZUNG VON WATTTESTÄBCHEN ABGERATEN?**
- 8. INHALT**
- 9. KONTAKTDATEN**

1. WARUM SOLLTEN SIE IHRE OHREN REINIGEN?
Ohrschmalz, bzw. Cerumen, ist eine Reinigungssubstanz Ihres Körpers. Mit ihm werden Verunreinigungen, Bakterien und andere Rückstände gebunden. Normalerweise gelangt das Ohrschmalz durch unsere Kaumuskelatur und andere Kieferbewegungen nach außen.

Ohrschmalz kann sich aber auch ansammeln und Ihr Gehör beeinträchtigen. Wenn sich zu viel Ohrschmalz angesammelt hat, spricht man von einem Pfropf.

Wenn Sie einen Pfropf haben, können Sie folgende Symptome wahrnehmen:

- Das betroffene Ohr schmerzt
- Völlegefühl oder Klingeln im Ohr
- Verschlechterung des Hörvermögens im betroffenen Ohr
- Schlechter Geruch aus dem betroffenen Ohr
- Schwindel
- Husten

Die Produktion von Ohrschmalz kann durch das Tragen von Hörgeräten oder Ohrstöpseln verstärkt werden. Ältere Menschen oder Personen mit Entwicklungsstörungen entwickeln oft mehr überschüssiges Ohrschmalz. Die Form Ihres Gehörgangs kann ausserdem den natürlichen Abfluss des Ohrschmalzes erschweren.

2. WAS IST EINE EARSHOWER OHRDUSCHEN?
Die earshower Ohrdusche ist eine Neuentwicklung und basiert auf derselben Technik, die auch von Ohrenärzten eingesetzt wird. Die earshower Ohrdusche enthält eine einzigartige Seife, mit der überschüssiges Ohrschmalz einfach ausgespült werden kann. Durch Wasser und Seife fließt es sanft aus Ihrem Gehörgang ab. Die earshower Ohrdusche ist eine effektive und einfache Methode zur regelmäßigen Reinigung des Gehörgangs zu Hause. Wie Zahnputzen sollte sie Teil Ihrer persönlichen Gesundheitsvorsorge und Hygiene sein.

Beugt Infektionen vor und verbessert Ihr Gehör: Mit der Seifenlösung in der earshower Ohrdusche spülen Sie überschüssiges Ohrschmalz einfach heraus.

- Die earshower Ohrdusche ist besonders hilfreich für
 - Sportlerinnen und Sportler, die oft mit Wasser in Kontakt kommen
 - Personen mit starker Cerumenproduktion
 - Personen, die Hörgeräte, Gehörschutz oder innenliegende Kopfhörer (in-ear) tragen
 - Personen, die regelmäßig Staub und Schmutz ausgesetzt sind

- 3. WIE WIRD DIE EARSHOWER OHRDUSCHEN VERWENDET?**
Die earshower Ohrdusche ist für die Nutzung zu Hause und für folgende Personen geeignet:
- Personen mit überschüssigem Cerumen
 - Personen, die ihren äußeren Gehörgang reinigen möchten
 - Erwachsene zur Selbstbehandlung
 - Kinder ab 3 Jahren

Am besten ist es, die earshower Ohrdusche während Ihrer normalen Dusche oder bei einem Bad anzuwenden. Spülen Sie die earshower Ohrdusche vor der Nutzung erst zwei Mal mit Wasser aus. Saugen Sie dann lauwarmes Wasser (max. 40°C) in das Gerät, spülen Sie das Ohr und trocknen Sie es anschließend. Wie bei einer professionellen Reinigung durch eine Spezialistin oder einen Spezialisten, reinigt die earshower Ohrdusche die Ohren mit natürlichem, lauwarmem Wasser. Das Seifenstück (einzigartige Seife) im Röhrchen erleichtert nicht nur den Reinigungsprozess, sondern zeigt auch an, wie lange die earshower Ohrdusche noch verwendet werden kann.

WIE WIRD DIE EARSHOWER OHRDUSCHEN VERWENDET?
Sprühdüse: Halten Sie die Sprühdüse an den Eingang zu Ihrem Gehörgang. Durch die Form und die Größe des Geräts wird verhindert, dass Sie die earshower Ohrdusche zu weit in das Ohr schieben.

Ansaugen: Saugen Sie mit dem Ansaugball lauwarmes Wasser (max. 40°C) in die earshower Ohrdusche und drücken Sie es sanft in den Gehörgang. Verwenden Sie die leere earshower Ohrdusche dann, um Luft in den Gehörgang zu blasen und so die Restflüssigkeit zu entfernen.

Sanfte und effektiv Seife: Bei der Vermischung mit lauwarmem Wasser, produzieren die Inhaltsstoffe der earshower Ohrdusche eine sanfte und doch effektive Seifenlösung.

Es werden drei Anwendungen pro Ohr empfohlen. Die blaue Seife ist nach etwa 30 Tagen farblos. Danach sollte die earshower Ohrdusche nicht mehr verwendet werden und das Gerät sollte durch ein neues ersetzt werden.

Festsitzende Rückstände im Ohr können nur entfernt werden, wenn die earshower Ohrdusche einige Tage lang verwendet wird.

4. KANN EINE EARSHOWER OHRDUSCHEN VON PERSONEN MIT HÖRGERÄT VERWENDET WERDEN?

Die earshower Ohrdusche eignet sich besonders für Personen, die ein Hörgerät tragen und bietet perfekte Hygiene für den Gehörgang, die für das gute Funktionieren eines Hörgeräts unentbehrlich ist. Wir empfehlen die Verwendung der earshower Ohrdusche alle zwei Tage.

5. GIBT ES RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DER EARSHOWER OHRDUSCHEN?

Die earshower Ohrdusche ist gut verträglich und wurde für Personen über 3 Jahren entwickelt. Beenden Sie bei einer allergischen Reaktion die Anwendung der earshower Ohrdusche.

Verwenden Sie sie nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.

⚠ Verwenden Sie die Ohrdusche nur nach medizinischer Rücksprache, wenn Sie eine Ohrenentzündung, Ohrschmerzen, ein verletztes Trommelfell haben und allgemein nicht bei Schwindelgefühlen oder bei medizinischen Vorschäden des Ohrs oder des Trommelfells.

- Sie können einen Cerumen-Pfropf haben, ohne es zu bemerken und es kann sein, dass dieser Pfropf nach der Verwendung der earshower Ohrdusche anschwillt und zu Unwohlsein führt. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Ärztin oder einen Arzt.
- Die earshower Ohrdusche sollte nicht bei Kindern unter 3 Jahren sowie bei entzündeten Gehörgängen oder Trommelfellentzündungen verwendet werden.
 - Die earshower Ohrdusche darf nur von erwachsenen Personen verwendet werden. Für die Anwendung bei Kindern ist eine Unterstützung durch einen Erwachsenen notwendig.

Die earshower Ohrdusche darf nicht angewendet werden an

- Personen mit Vorschäden (z.B. Riss) oder Verformungen des Trommelfells.
- Personen mit Vorschäden des Gehörgangs.
- Kindern unter 3 Jahren.

Verwenden Sie die earshower Ohrdusche bis max. 30 Tage nach der ersten Verwendung. Halten Sie sie von Kindern unter 3 Jahren fern. Kleine Teile können ein Erstickenrisiko darstellen – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

⚠ Wenn Ihre Gehörgänge verstopft sind, suchen Sie bitte eine Spezialistin oder einen Spezialisten auf. Nach der professionellen Reinigung durch eine Spezialistin oder einen Spezialisten empfehlen wir die regelmäßige Spülung mit der earshower Ohrdusche, um einer erneuten Ansammlung von Ohrschmalz vorzubeugen.

6. WARUM IST DIE EARSHOWER OHRDUSCHEN SO SICHER ZU VERWENDEN?

Die earshower Ohrdusche spült das Cerumen ohne mechanische Einwirkung gründlich aus. Die runde Form des Ohrstücks macht die Anwendung zu einer angenehmen Erfahrung. Die Maße verhindern ein zu weites Eindringen in den Gehörgang und machen Verletzungen, vor allem am Trommelfell, daher im Grunde unmöglich. Das Ohrstück ist zugleich der Sprühkopf. Seine patentierte Form gewährleistet, dass die Spüllösung optimal im Gehörgang verteilt wird. Das olvenförmige Ohrstück schützt auch vor übermäßigem Druck.

Halten Sie Ihre earshower Ohrdusche beim Duschen oder Baden immer in Reichweite.

7. WARUM WIRD VON DER NUTZUNG VON WATTTESTÄBCHEN ABGERATEN?

Die Nutzung von Wattestäbchen wird von Medizinern kritisch betrachtet, da es so zu einem Cerumen-Pfropf kommen kann. Das Wattestäbchen schiebt das Cerumen leicht in den Gehörgang hinein. Durch zu weites Eindringen des Wattestäbchens kann es zu Rissen im Trommelfell kommen.

8. INHALT:

- 1 earshower Ohrdusche
- Gebrauchsanweisung

SODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WATER), SORBITOL, SUCROSE, PEG-4001, TETRASODIUM.

BEI RAUMTEMPERATUR LAGERN (10-25 °C). VERWENDUNG INNERHALB VON 8 MONATEN NACH ERSTER NUTZUNG. EARSHOWER OHRDUSCHEN NICHT IN SICHTWEITE UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

9. KONTAKTDATEN

Vertrieb
guterrot Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG
Eduard-Bodem-Gasse 6
A-6020 Innsbruck
Österreich
earclin@guterrot.net

Datum der letzten Überarbeitung: Sept 2018

Hersteller
TheOTCLab
Paulus Potterstraat 20-11
1071 DA Amsterdam
The Netherlands
www.theotclab.com

