

earClin® earshower -korvasuihku on lääkinällinen laite. Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttämään earClin® korvasuihkuja. Älä hukkaa tätä potilasohjetta.

1. MIKSI KORVAT TULISI PUHDISTAA?
2. MIKÄ ON EARCLIN® EARSHOWER?
3. MITEN EARCLIN EARSHOWER KORVASUIHKUJA KÄYTETÄÄN?
4. VOIKO KUULOKOJEEN KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ EARCLIN® EARSHOWER-IA?
5. LIITYYKÖ EARCLIN® EARSHOWERIN KÄYTTÖÖN JOTAIN RISKEJÄ?
6. MIKSI EARCLIN® EARSHOWER ON TURVALLINEN KÄYTTÄÄ?
7. MIKSI VANUPOIKKOJEN KÄYTTÖÄ EI SUOSITELLA?
8. SISÄLTÖ
9. YHTEYSTIEDOT

1. MIKSI KORVAT TULISI PUHDISTAA?

Korvavaha eli korvavaihu on elimistömme itseutuutama puhdistusaine. Se kerää likaa, bakteereita ja muita epäpuhtauksia. Normaalisti vaha kulkeutuu ulos korvasta pureskelun ja muiden leuan liikkeiden aikana.

Korvavaha voi kasautua ja vaikuttaa kuuloomme. Kun näin käy, voi seurauksena kehittyä vahatulppa. Vahatulppa voi aiheuttaa seuraavia oireita:

- kipua korvassa
- korvan tuntumista tukkoiselta tai korvien soimista
- kuulon heikkenemistä tukkoutuneessa korvassa
- epämiellyttävää hajua tukkoutuneessa korvassa
- huimausta
- yskää

Ikäihmisillä, kuulokojeita tai korvatulppia käyttävillä on suurempi todennäköisyys sille, että korvavaihu erittyy liikaa. Myös korvan anatomia voi vaikeuttaa eriteen luonnollista poistumista.

2. MIKÄ ON EARCLIN EARSHOWER?

earClin® earshower korvasuihku on kehitetty käyttäen samaa tekniikkaa, jota erikoislääkärit käyttävät. Se sisältää ainutlaatuisen pinta-aktiivisen yhdistelmän, joka yksinkertaisesti huuhtelee ylimääräisen vahnan pois.

Se huuhtelee hellästi korvakäytävän pinta-aktiivisella liuoksella ja on siten yksinkertainen menetelmä korvien puhdistamiseen. earClin® korvasuihku on tehokas ratkaisu korvien säännölliseen puhdistamiseen kotiosuhteissa. Kuten hampaiden harjauksen, sen tulisi olla osa päivittäistä terveyttä ja hygieniaa. Ehkäise tulehduksia ja huolehdi kuuloastasi: Käytä earClin® korvasuihkuja ja yksinkertaisesti huuhtelee liika vaihku pois.

earClin® korvasuihku on erityisen hyödyllinen:

- Urheilijoilla, joilla on jatkuva kontakti veteen
- Henkilöillä, joilla kehittyi runsaasti korvavaihua
- Kuulokojeita, korvatulppia tai napppulokkeita käyttävillä
- Henkilöillä, jotka alistuvat jatkuvasti pölylle ja lialle

3. MITEN EARCLIN EARSHOWER KORVASUIHKUJA KÄYTETÄÄN?

earClin® korvasuihku on tarkoitettu kotikäyttöön:

- Kuulokojeita käyttävillä
- Henkilöille jotka haluavat pitää korvakäytävänsä puhtaina
- Aikuisille yksin käytettäväksi
- Yli 3-vuotiaille lapsille aikuisen annostelemana

Paras hetki käyttää earClin korvasuihku on suihkun tai kylpy-yhteydessä. Ensimmäinen käyttökerta: Huuhtelee earClin korvasuihku ensin puhtaalla vedellä. Ime sen jälkeen kädenlämpöistä vettä (max 40°C) laitteeseen, huuhtelee korva, ja kuivaa laite sen jälkeen. Kuten ammattilaisten käyttämässä menetelmässä earClin korvasuihku puhdistaa korvan luonnollisesti lämpöisellä vedellä. Sisällä oleva pinta-aktiivinen aines osallistuu puhdistukseen ja kertoo, kuinka kauan laitteessa on käytettävä jäljellä. Sininen pinta-aktiivinen aines häviää noin 30 vuorokauden jälkeen, jonka jälkeen korvasuihku ei tulisi enää käyttää, vaan tilalle tulisi hankkia uusi.

Kuinka earClin korvasuihkuja käytetään?

Pumppu: Purista pumpusta ja ime laitteeseen kädenlämpöistä vettä (max 40°C). Suihkuta sitä hellästi korvakavaan. Käytä sen jälkeen tyhjää earClin earshower korvasuihku puhalttaaksesi ilmaa korvakavaan, jotta se kuivuu.

Laiteen suutin: Aseta suutin korvakäytävän suulle. Sen muoto ja koko estävät sinua työntämästä vahingossa earClin® korvasuihku liian syvälle korvaasi.

Hellä ja tehokas pinta-aktiivinen aine: Laitteen pinta-aktiivinen aine muodostaa kädenlämpöisen veden kanssa hellän saippuisen yhdisteen. Kun sininen puhdistusaine laitteessa häviää, earClin korvasuihkuksi on tyhjä ja se tulee vaihtaa uuteen.

On suositeltavaa suihkuttaa korvat kolme kertaa peräkkäin. Sitkeimmät vahapaakut korvan sisällä vaativat puhdistukseen laitteen usean päivän käytön peräkkäin.

4. VOIKO KUULOKOJEEN KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ EARCLIN® EARSHOWER-IA?

earClin® korvasuihku on erityisesti tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät kuulokojeita. Säännöllinen suihkutus pitää korvat erittäin puhtaina, mikä edesauttaa kojeen moitteetonta toimintaa.

5. LIITYYKÖ EARCLIN EARSHOWERIN KÄYTTÖÖN JOTAIN RISKEJÄ?

earClin® earshower-korvasuihku on hyvin siedetty, ja suunniteltu erikseen aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille.

Lopeta laitteen käyttö, mikäli saat minkä tahansa allergisen reaktion. Älä käytä laitetta, jos olet allerginen jollekin sen sisältämälle aineosalle.

⚠️ Älä käytä ilman lääkärin suositusta mikäli sinulla on korvatulehdus, kipua korvassa, vaurioitunut tärykalvo, taipumusta huimaukseen tai korviin tai tärykalvoon liittyviä riskitekijöitä. Mikäli kärsit tietämättäsi vahatulppasta, se voi turvota earClin® korvasuihkuja käytettäessä, ja aiheuttaa epämiellyttäviä tunteita. Ota tällöin yhteyttä lääkäriin.

- earClin® korvasuihkuja ei tule käyttää alle 3-vuotiaille lapsille tai tulehtuneeseen korvaan tai tärykalvovaurioihin.
- Pidä laite pienten lasten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa suuhun joutuessaan tukehtumisvaaran.

earClin earshoweria ei tule käyttää

- henkilöillä, joilla on tärykalvovaurioita tai epämudostumia
- henkilöillä, joilla on vaurioitunut korvakäytävä
- alle 3-vuotiaille lapsille

Käytä earClin korvasuihku enintään 30 vrtäjaksoisesti ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Pidä alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

⚠️ Jos korvat ovat tukossa, on lääkärin konsultointi suositeltavaa. Kun korvat on puhdistettu ammattilaisten toimesta, kannattaa aloittaa uudestaan earClin® korvasuihku käyttö, jotta liika vaha ei pääse kertymään uudelleen.

6. MIKSI EARCLIN EARSHOWER ON TURVALLINEN KÄYTTÄÄ?

earClin® earshower korvasuihku huuhtelee erittäin tehokkaasti korvasta ilman tarvetta mekaaniseen puhdistukseen. Korvakappaleen pyöreä muoto tekee siitä miellyttävän tuntuinen korvaan vasten. Sen mittasuhteet estävät sitä lyöntymästä liian syväle korvakavaan, jolloin vaurioita ei juurikaan voi syntyä, erityisesti tärykalvoon. Yhjä lailla korvakappale toimii sumunpäänä. Sen patentoitu muoto varmistaa, että huuhteluneste levittyy optimaalisesti korvakavaan. Ollivn muotoinen korvakappale toimii myös suojaana liialliselle paineelle.

Säilytä earClin® korvasuihku käden ulottuvilla käydessäsi suihkussa tai kylvyssä.

7. MIKSI VANUPOIKKOJEN KÄYTTÖÄ EI SUOSITELLA?

Terveydenhuollon ammattilaiset eivät suosittele vanuupukkojen käyttöä, sillä ne voivat jättää vahatulpan muodostumiseen. Vanuupukkoja käytetään sokkana ja ne työntävät korvavaha syvemmälle korvakäytävään. Vanuupukko voi myös vaurioittaa tärykalvoa.

8. SISÄLTÖ:

- 1 earClin® earshower korvasuihku
- käyttöohje

AINESOSAT: NATRIUM TALLOVAATTI, GLYSEERIINI, VESI, SORBITOLI, SAKKAROOSI, PEG-4001, TETRANATRIUM.

SÄILYYS HUONEENLÄMMÖSSÄ (10-25°C). KÄYTTÄVÄ 8 KK SISÄLLÄ AVAAMISESTA. SÄILYTETÄÄN LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.

9. CONTACT DETAILS

Jakelija
Aboutmeds Oy
Suomi/Finland
info@aboutmeds.fi

Valmistaja
TheOTClub
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Alankomaat/Nederlândia
www.theotclub.com

Last revision date: **September 2022**



10ml



V9752816_2211

earClin-öronduschen är en mediceknisk produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder earClin®-öronduschen. Tappa inte bort denna patientanvisning.

1. VARFÖR ÄR DET BRA ATT RENGÖRA ÖRONEN?
2. VAD ÄR EARCLIN EARSHOWER?
3. HUR ANVÄNDS EARCLIN EARSHOWER-ÖRONDUSCHEN?
4. KAN PERSONER MED HÖRRAPPARAT ANVÄNDA EARCLIN® EARSHOWER?
5. FINNS DET RISKER FÖRKNIPPADE MED ANVÄNDNING AV EARCLIN® EARSHOWER?
6. VARFÖR ÄR DET SÄKERT ATT ANVÄNDA EARCLIN® EARSHOWER?
7. VARFÖR ÄR ANVÄNDNING AV VADDPINNAR INTE ATT REKOMMENDERA?
8. INNEHÅLL
9. KONTAKTUPPGIFTER

1. VARFÖR ÄR DET BRA ATT RENGÖRA ÖRONEN?

Öronvax är ett rengöringsmedel som vår kropp själv producerar. Det samlar smuts, bakterier och andra orenheter. Vanligtvis kommer vaxet ut ur örat vid tuggande och andra käkrörelser.

Öronvaxet kan samlas och påverka hörseln. Då kan det bildas en vaxpropp. En vaxpropp kan ge följande symptom:

- ont i örat
- örat kan kännas täppt eller det kan ringa i öronen
- hörseln kan försämrats då örat är täppt
- obehaglig lukt i det täppta örat
- yrsel hosta

För äldre personer och personer som använder hörrapparat eller öronproppar är det mer sannolikt att det utsöndras för mycket öronvax. Även örats anatomi kan göra det svårt för öronvaxet att komma ut på naturligt sätt.

2. VAD ÄR EARCLIN EARSHOWER?

earClin® earshower-öronduschen har utvecklats genom att använda samma teknik som specialisterna använder. Den innehåller en unik yttaktiv lösning som enkelt sköljer bort överflödigt vax.

Den sköljer skonsamt hörselgången med en yttaktiv lösning, och är därför en enkel metod att rengöra öronen. earClin®-öronduschen är en effektiv metod för regelbunden rengöring av öronen hemma. Såsom tandborstning borde det vara en del av din dagliga hälsa och hygien. Förebygg infektioner och värda din hörsel. Använd earClin® och skölj enkelt bort överflödigt vax.

earClin®-öronduschen är särskilt nyttig för:

- Idrottare som regelbundet är i kontakt med vatten
- Personer som har mycket öronvax
- Personer som använder hörrapparat, öronproppar eller öronsnäckor
- Personer som regelbundet utsätts för damm och smuts

3. HUR ANVÄNDS EARCLIN EARSHOWER-ÖRONDUSCHEN?

earClin®-öronduschen är avsedd för hemmabruk för:

- Personer med hörrapparat
- Personer som vill hålla sina hörselgångar rena
- Vuxna för självständig dosering
- Barn över 3 år vid dosering av vuxen

Bästa stunden att använda earClin®-öronduschen är i samband med dusch eller bad. Första gången du använder produkten: Skölj först earClin®-öronduschen med rent vatten. Sug sedan upp ljumt vatten (max 40°C) i apparaten, skölj örat och torka därefter av apparaten. earClin®-öronduschen expanderar örat på ett naturligt sätt med varmt vatten, med samma metoder som experter använder. Den yttaktiva lösningen hjälper till att rengöra örat och anger hur länge apparaten ännu kan användas. Det blåa yttaktiva ämnet försvinner efter ungefär 30 dygn varefter örduschen inte längre ska användas utan en ny köpas.

Hur används earClin®-öronduschen?

Pumpen: Tryck på pumpen och sug upp ljumt vatten (max 40°C). Duschas försiktigt i hörselgången. Använd därefter den tomma earClin® earshower-öronduschen för att blåsa in luft i hörselgången, så att den torkar.

Apparatens munstycke: Placera munstycket vid hörselgångens öppning. Dess form och storlek hindrar dig från att av misstag skjuta in earClin®-öronduschen för långt in i örat.

Sksam och effektiv yttaktiv lösning: Apparats yttaktiva lösning bildar tillsammans med ljumt vatten en mild tvåktig förening. Då det blåa rengöringsmedlet försvinner från apparaten är earClin®-öronduschen tom och ska bytas ut mot en ny.

Duscha öronen tre gånger i följd. De senaste vaxpropparna inne i örat kräver att du använder apparaten fler dagar i följd.

4. KAN PERSONER MED HÖRRAPPARAT ANVÄNDA EARCLIN®-ÖRONDUSCHEN?

earClin®-öronduschen är särskilt avsedd för personer med hörrapparat. Genom att duscha öronen regelbundet förblir de rena, vilket gör att hörrapparat fungerar som den ska.

5. FINNS DET RISKER FÖRKNIPPADE MED ANVÄNDNING AV EARCLIN® EARSHOWER?

earClin® earshower-öronduschen tolereras väl och är avsedd för vuxna och barn över 3 år.

Sluta använda apparaten om du får någon som helst allergisk reaktion. Använd inte apparaten om du är allergisk mot någon av de beståndsdelar som den innehåller.

⚠ Använd inte utan rekommendation av läkare om du har öroninflammation, ont i örat, skadad trumhinna, benägenhet till yrsel eller riskfaktorer förknippade med öronen eller trumhinnan. Om du utan att du vet om det har en vaxpropp i örat kan den svälla när du använder earClin®-öronduschen och orsaka obehagliga förnimmelser. Kontakta då en läkare.

- earClin®-öronduschen ska inte användas för barn under 3 år eller vid öroninflammation eller problem med trumhinnan.
- Förvara apparaten utom räckhåll för små barn. Små delar kan orsaka risk för kvävning om de hamnar i munnen.

earClin®-öronduschen ska inte användas

- av personer med skadad trumhinna eller missbildningar i örat
- av personer med skadad hörselgång för barn under 3 år

Använd earClin®-öronduschen högst 30 dygn i följd efter den första gången. Förvara utom räckhåll för barn under 3 år. Små delar kan orsaka risk för kvävning.

⚠ Om ditt öra är täppt rekommenderas konsultation av läkare. När en expert har rengjort öronen är det bra att använda earClin®-öronduschen, så att det inte samlas för mycket vax på nytt.

6. VARFÖR ÄR DET SÄKERT ATT ANVÄNDA EARCLIN EARSHOWER?

earClin® earshower-öronduschen sköljer effektivt sekretet ut ur örat utan behov av mekanisk rengöring. Öronstykets runda form gör att det känns behagligt mot örat. Dess proportioner förhindrar det från att skjutas för långt in i hörselgången, varvid det inte kan ske skador, särskilt på trumhinnan. Öronstycket fungerar också som sprayhuvud. Dess patenterade form säkerställer att sköljvätskan sprids ut optimalt i hörselgången. Det olivformade öronstycket fungerar också som ett skydd mot för hårt tryck.

Ha earClin®-öronduschen inom räckhåll när du duschar eller tar ett bad.

7. VARFÖR ÄR ANVÄNDNING AV VADDPINNAR INTE ATT REKOMMENDERA?

Hälsövrådsexperten rekommenderar inte användning av vaddpinnar för att de kan bidra till att det bildas en vaxpropp. Man ser inte vad man gör då man använder vaddpinnar och de skjuter öronvaxet djupare in i hörselgången. Vaddpinnar kan också skada trumhinnan.

8. INNEHÅLL:

- 1 earClin earshower-öronduschen
- bruksanvisning

BESTÅNDSDELAR: NATRIUMTALLOWAT, GLYSERIN, VATTEN, SORBITOL, SACKAROS, PEG-4001, TETRANATRUM.

FÖRVARAS I RUMSTEMPERATUR (10-25°C). ANVÄND INOM 8 MÅNADER EFTER ATT FÖRPACKNINGEN ÖPPNATS. FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

9. CONTACT DETAILS

Distributör
Aboutmeds Oy
Suomi/Finland
info@aboutmeds.fi

Tillverkare
TheOTClab
Fred. Roesestraat 115
1076 EE Amsterdam
Alankomaat/Nederländerna
www.theotclab.com

Last revision date: **September 2022**



10ml



V9752816_2211