

EarClin 3in1 oorspray is een medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

# earClin

## 3in1 oorspray

1. WAAROM WORDT ER GEADVISEERD OM ONZE OREN TE REINIGEN?
2. WAT IS EARCLIN 3IN1 OORSPRAY?
3. HOE MOET EARCLIN 3IN1 OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT?
4. KAN EARCLIN OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET EEN GEHOORAPPARAAT?
5. ZIJN ER RISICO'S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN EARCLIN 3IN1 OORSPRAY?
6. INHOUD
7. CONTACTGEGEVENS

**ALGEMEEN ADVIES:** Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u earClin 3in1 oorspray gaat gebruiken, ook als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn deze nogmaals te lezen.

### 1. WAAROM WORDT ER GEADVISEERD OM ONZE OREN TE REINIGEN?

Oorsmeer, of cerumen, is een zelfreinigend middel dat ons lichaam produceert. Het verzamelt vuil, bacteriën en ander afval. Meestal werkt de smerer zich naar buiten door kauwen en andere bewegingen van de kaak.

Oorsmeer kan zich opstapelen en ons gehoor beïnvloeden. Wanneer dit gebeurt noemen we dit impactie, of oorprop. Als bij u sprake is van impactie, kunt u last hebben van een of meerdere van de volgende symptomen:

- pijn in het aangetaste oor
- vol gevoel of oorsuizen
- minder gehoor in het aangetaste oor
- een geur uit het aangetaste oor
- duizeligheid
- hoesten

Raadpleeg in dat geval een arts. earClin 3in1 oorspray is hiervoor niet geschikt.

De kans dat er een teveel aan oorsmeer ontstaat is groter als je een gehoorapparaat of oordopjes gebruikt. De vorm van de gehoorgang kan de natuurlijke verwijdering van smerer bemoeilijken.

### 2. WAT IS EARCLIN 3IN1 OORSPRAY?

De bijzondere 3in1 formule van earClin 3in1 oorspray behandelt de 3 meest voorkomende oorklachten. EarClin 3in1 oorspray voorkomt en verlicht jeuk als gevolg van overtollig oorsmeer in de uitwendige gehoorgang. EarClin 3in1 oorspray wordt gebruikt om overtollig oorsmeer te verwijderen uit de uitwendige gehoorgang. Daarnaast reinigt en verzorgt earClin 3in1 oorspray de uitwendige gehoorgang. De oorspray is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar. Vooral ouderen en dragers van gehoorapparaten vertonen een verhoogde mate van oorsmeerproductie. earClin 3in1 oorspray kan worden gebruikt zonder handmatige verwijdering van de oorsmeer en is een uitstekend alternatief voor het gebruik van wattenstaafjes. Wattenstaafjes kunnen niet alleen het trommelvlies beschadigen, maar hebben vaak het negatieve resultaat het overtollige oorsmeer dieper in de gehoorgang te duwen.

### 3. HOE MOET EARCLIN 3IN1 OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT?

Dosering: Dagelijks 2-3 doseringen in elk oor. Gebruik earClin 3in1 oorspray niet langer dan 30 dagen achtereenvolgend. De spray is zo mild dat men desgewenst de dosering mag verhogen tot maximaal 6 keer sprayen.

**Wijze van toepassing:** Wanneer de verpakking voor de eerste keer wordt gebruikt is het raadzaam het dopje nog even extra aan te draaien. Het tuitje is reeds voorzien van een gaatje en moet volledig horizontaal worden gedraaid waarna het mogelijk is om de dop in te drukken. De vloeistof verlaat dan het tuitje in een fijne nevel.

Houd de sprayflacon enige tijd in uw hand om de vloeistof wat op te warmen. Daarna goed schudden voor gebruik. Zorg dat u een tissue bij de hand hebt. Breng het tuitje dicht bij de gehoorgang. Spray 2-3 keer. Druk de gehoorgang dicht en masseer de onderkant van het oor gedurende 5 tot 10 seconden. Houd het hoofd schuin naar een kant zodat de vloeistof met het meegevoerde overtollige oorsmeer eruit kan lopen. Vang dit op met de tissue. Veeg de oorschelp schoon. Het is essentieel dat de spraykop na gebruik goed schoon wordt

gemaakt. Grondig reinigen met warm water en droogmaken met een tissue.

### 5. KAN EARCLIN 3IN1 OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET EEN GEHOORAPPARAAT?

earClin 3in1 oorspray is geschikt voor mensen die een gehoorapparaat dragen. Regelmatig gebruik (2-3 keer per week) zorgt voor een optimale hygiëne van de gehoorgang, wat positief bijdraagt aan de werking van het gehoorapparaat.

### 5. ZIJN ER RISICO'S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN EARCLIN 3IN1 OORSPRAY?

Er zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend van de ingrediënten die in earClin 3in1 oorspray worden gebruikt. Wel kan overgevoeligheid optreden of ontwikkeld worden voor oorspray.

### GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN/ OF BORSTVOEDING:

Het gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding wordt alleen aanbevolen na overleg met uw dokter.

### COMBINATIE MET GENEESMIDDELEN:

Het is niet aan te bevelen om earClin 3in1 oorspray te gebruiken als u al geneesmiddelen in het oor toepast.

### TOEDIENING BIJ KINDEREN:

U kunt de milde earClin 3in1 oorspray bij kinderen vanaf 3 jaar toepassen. Vergeet daarbij niet de aandacht te schenken aan wat geschreven is onder "Waarschuwingen". Om alle risico's te vermijden is toepassing niet gewenst bij kinderen met een overgevoelige huid, met name bij overgevoeligheid voor zeep.

### ⚠ WAARSCHUWING:

De oorspray niet toepassen in gevallen van oorontsteking of oorpijn, bij vreemde voorwerpen in het oor, bij trommelvliesperforatie en bij dragers van trommelvliesbuisjes. Het gebruik van de oorspray moet worden gestaakt als oorsuizen (tinnitus) of duizeligheid ontstaat of indien herhaalde pijnklachten ontstaan direct na het toedienen van de oorspray. Overleg met uw arts bij twijfel. earClin 3in1 oorspray dient niet te worden gebruikt bij overgevoeligheid (allergie) voor één of meerdere bestanddelen. Roodheid van de huid, jeuk, aanhoudende vochtafscheiding of oorpijn direct na het sprayen kan een aanwijzing zijn voor overgevoeligheid. De spray bevat zeep en kan irritatie veroorzaken indien gebruikt in mond of ogen. Indien de spray per ongeluk in de mond of oog wordt gesprayd, deze direct uitspoelen met veel water.

### 6. INHOUD

- 1 earClin 3in1 oorspray 20ml

INGREDIENTEN: AQUA, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC.

### WIJZE VAN BEWAREN:

Dit product dient u op een droge plaats, buiten invloed van zonlicht bij kamertemperatuur (15-25°C) te bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden.

### MEDISCH HULPMIDDEL:

earClin 3in1 oorspray is een medisch hulpmiddel klasse I conform de medische hulpmiddelenrichtlijn 93/42/EEC. Gebruik de earClin 3in1 oorspray niet langer dan 30 opeenvolgende dagen.

### 📅 UITERSTE GEBRUIKSdatum:

earClin 3in1 oorspray zie omverpakking. Na opening 1 maand houdbaar.

### 7. CONTACTGEGEVENS


Vragen? Neem gerust contact met ons op: 085 4444 202

#### Distributeur

TheOTC Lab  
Fred. Roeskestraat 115  
1076 EE, Amsterdam  
Nederland  
www.theotclub.nl

#### Fabrikant

PK Benelux BV  
Vluchtlaan 17  
5406 XP, Uden  
Nederland

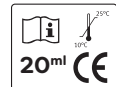

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: November 2022

www.earclin.nl

V9758801\_22K1  
073453 v2.2